

## **A WoundClot speciális vérzéscsillapító kötszer használata** (10x20 cm, illetve 8x100 cm)

A WoundClot **steril**, egyszer használatos, biokompatibilis **vérezscsillapító kötszer**. Folyadékkal/vérrel érintkezve rövid idő alatt viszkózus géllé alakul, rátapad a sebre és nagy mennyiségben köti meg a vérlemezkéket, alvadási faktorokat, cellulóz alapú hálós szerkezete pedig segíti a véralvadás beindulását.

Így egyrészt mechanikus akadályt képezve, másrészt a véralvadás folyamatának gyorsítása révén hatásosan csillapítja a vérzést.

Alkalmas **súlyos, más módon nem csillapítható artériás, illetve vénás vérzések** ellátására.

A kötszer felhelyezése során kompressziót nem igényel, így előnyös lehet nem, vagy nehezen komprimálható sebek vérzésének csillapítására, így alkalmas lehet a fej, nyak régió vérzéseinek csillapítására, mély szúrt/lőtt sebzések (pl. máj-, léptájék) ellátására, de használható többek között jelentősebb orrvérzés esetén is.

(Megj.: szükség lehet a kötszer mély bevezetésére is.)

Alkalmazása:

1. Vegyünk fel védőkesztyűt.
2. Bontsuk fel a steril csomagolást, a csúcsánál fogva vegyük ki a kötszert.
3. Helyezzük óvatosan a vérzés helyére és enyhén nyomjuk rá, hogy a kötszer érintkezzen a vérző területtel.
4. Várjuk meg, míg a géz teljesen átítatódik a vérrel, közben továbbra is enyhén nyomjuk a vérző területre.
5. Amennyiben a vérzés megfelelő mértékben csillapodott, ebben a helyzetben rögzítsük a kötszert.
6. Amennyiben a vérzés nem csillapodott megfelelő mértékben, távolítsuk el a kötszert, ismételjük meg a 3-5. lépéseket, és/vagy a WoundClot fölé helyezzünk fel fedő/nyomókörtést.

*A kötszer eltávolítása*

A kötszer a vérzés megszűnését követően sóoldattal történő átítatása után a sebből óvatosan eltávolítható, ezt azonban a prehospitalis szakaszban nem javasoljuk.

További információk:

<http://www.woundclot.com/?environment=ems>

<https://www.youtube.com/watch?v=k6WKkpBTioI>

<https://www.youtube.com/watch?v=me13l-ltUcs>

<https://www.youtube.com/watch?v=crkFoZYsEv4>